

İçindekiler

Palm Pump™'li bir Kiwi Vakum

Tanım

Clinical Innovations ürünü Kiwi tek kullanımlık vakumlu bir bebek doğum sistemidir. Aşağıdaki koşullarda doğumlara yardımcı olmak için tasarlanan, steril, tek hastada kullanılabilen bir cihazdır: 1) Zamanında gebelik, 2) Delinmiş amniyotik zar, 3) Sıkışmış kafa, 4) Tam servikal dilatasyon ve 5) Yeterince eğitilmiş veya gözetim altında operatör.

Endikasyonlar

Standart Vakumlu Doğum

Aşağıdaki durumlarda vakumlu doğumlu için kullanılır: 1) Uygun bir şekilde yönetilen ikinci evreden sonra anında doğum yapılamaması 2) Belirtilen maternal veya fetal koşullarda olduğu gibi fetopelvik ilişkilerin yeterli olduğu durumlarda doğumun ikinci aşamasının uzaması (fetusun inişinin takılması) (Maternal koşullar: Bitkinlik, doğumun ikinci aşamasının önleyen hastalıklar, plasentanın kopması, işbirliği eksikliği, aşırı analjezi, yetersiz kasılma etkinliği veya uterusun hareketsizliği. Fetal koşullar: Kordonun sarkması, bebeğin kafasının ters durması), 3) Ciddi olduğu düşünülmeyen tahmini fetus kaybı riski veya 4) Belirli maternal veya fetal koşullar için ikinci evrenin kısaltılmasının seçilmesi.

Vakumlu Doğum Denemesi

Vakumlu doğum aşağıdaki durumlarda bir "deneme" olarak kabul edilmelidir: 1) İkinci evrede iniş durmuşsa veya fetopelvik ilişkilerin sınırda olduğu düşünülüyorsa, 2) Pelvis ortası bir çıkarma sırasında konum ve stasyon biliniyorsa 3) Pelvis ortası bir çıkarma sırasında tahmini fetus kaybı riski düşük riskten yüksek olarak kabul ediliyorsa.

Aşağıdaki durumlarda vakumlu doğum kesilmeli ve doğum sezaryenle tamamlanmalıdır: 1) 2 traksiyondan sonra kafanın inişi (ilerlemesi) gerçekleşmezse, 2) 4 traksiyondan sonra doğum gerçekleşmezse veya çok yakın olmazsa veya vakum vantuzu iki kez ayrılırsa ("çıkarsa").

Işınlama Yöntemiyle Sterilize Edilmiştir. Ambalaj Açılmadığı veya Hasar Görmediği Sürece Steril Olduğu Garanti Edilir. Yeniden Sterilize Etmeyin. Federal (ABD) Yasalar Bu Cihazın Satışını Bir Doktor Tarafından veya Siparişiyle Yapılmak Üzere Kısıtlar. Kullanım Talimatlarına Bakın. (Kitapçık nakliye kutusundadır)

Tek Kullanımlık Latekssiz

Kontrendikasyonlar

1) Fetopelvik ilişkilerin yetersiz olduğu düşünülen durumlarda inişin kesintiye uğraması. 2) Görünen kısmın angaje olmaması durumunda. 3) Baş dışındaki kısımların görünür olması durumunda (kıç, yüz, alın, transvers pozisyon). 4) Delinmemiş zarlar. 5) Tamamlanmamış servikal dilatasyon ve efasman. 6) Aşırı erken doğum. 7) Bilinen fetus pıhtılaşma bozuklukları.

Önlemler

ACOG Teknik Bülteni No. 196 Ağustos 1994: "Forseps prosedürlerinde olduğu gibi, yeterli ilerleme elde edilemediğinde vakumlu çıkarma denemelerinden vazgeçmek tercih edilmelidir."

Yakın gözlemler için ek koşullar:

1) 37 haftadan az gebelik yaşı veya 2.500 gramdan az tahmin edilen fetus ağırlığı (EFW), 2) Önceden kafa derisinden numune alınması, 3) Kafa derisi hasarı, 4) Doğru değerlendirilen yerleştirme işleminden sonra uzun süre başarısız olunması, 5) Olağandışı sayıda traksiyon veya döner forseps kullanımı gerektiren doğum, 6) Makrozomi şüphesi.

Olumsuz Olaylar

Fetal Yaralanmalar: Sefalhematom, subdural, subgaleal, entraventriküler veya parankimal hematom, subkonjunktival, intrakraniyal veya retinal kanama, sinir zedelenmeleri, yenidoğan sarılığı, bilirubin seviyesinde artış, bereler, kontüzyonlar, yırtılmalar, kırıklar.

Maternal Yaralanmalar: Yumuşak doku yaraları, epizyotomi uzantıları.

Uyarılar

Kullanımı eğitilmiş, deneyimli veya gözetim altındaki operatörlerle sınırlanmalıdır. Yerleştirme işlemi, aseptik teknik kullanılarak, dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Zorlayarak yerleştirilmesi, arızaya, hastanın rahatsız olmasına veya hastada/fetusta travmaya neden olabilir. Vantuzu asla bebeğin yüzüne uygulamayın veya tavsiye edilen vakum, süre limitlerini veya vantuz "çıkarma" uygulamalarını aşmayın.

P/N 054-0043 Rev C
ABD'de üretilmiştir